


# Guide rapide pour Oticon Opn et l'application Oticon ON 1.8.0



**oticon**  
PEOPLE FIRST

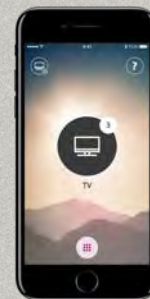

# Introduction

Ceci est un guide détaillé sur l'utilisation d'Oticon Opn et de l'application Oticon ON avec un iPhone®.

- Comment appairer les aides auditives avec un iPhone
- Utilisation quotidienne de l'iPhone avec les aides auditives pendant un appel
- Comment utiliser l'application Oticon ON

## Quoi de neuf dans la version

1.8

Assistance pour des fonctions Acouphènes plus avancées . . . . . 14

Rendez-vous sur le site [www.oticon.fr/connectivity](http://www.oticon.fr/connectivity) pour de plus amples informations sur la compatibilité, ou consultez la description de l'application Oticon ON sur App Store®.


Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.



# Sommaire

- 4 | Comment appairer un iPhone avec Oticon Opn
- 6 | Aides auditives comme sortie audio par défaut
- 8 | Installer l'application Oticon ON
- 10 | Première utilisation
- 11 | Fonctions de l'écran d'accueil
- 12 | Sélection du programme/volume et activation du mode silencieux
- 14 | Sélectionner/modifier le programme avec sons de soulagement des acouphènes
- 16 | Écouter la télévision
- 17 | Écouter le son du microphone
- 18 | Les sons de l'iPhone directement dans vos aides auditives
- 20 | Connexion à Internet/IFTTT
- 22 | Fonctions secondaires
- 26 | Apple Watch


# Comment appairer un iPhone avec Oticon Opn

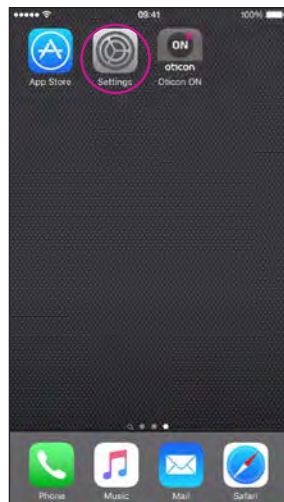


**Accédez aux Paramètres**  
Trouvez l'icône Paramètres sur l'iPhone.




**Sélectionnez Général**

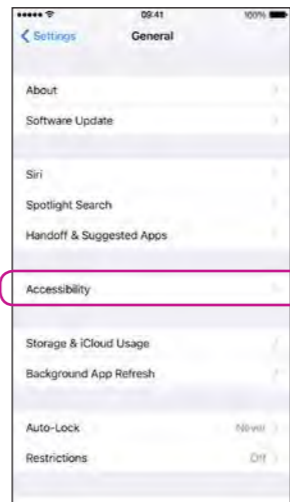


**Sélectionnez Accessibilité**

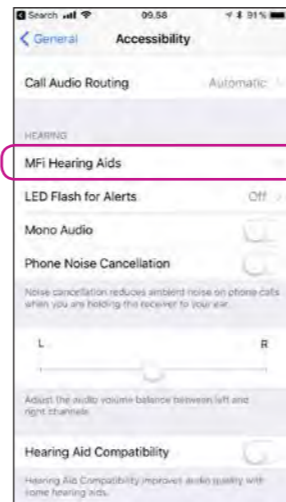


**Sélectionnez Aides Auditives MFi**

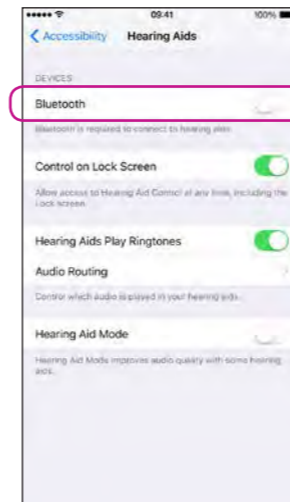


**Assurez-vous que le Bluetooth est activé**

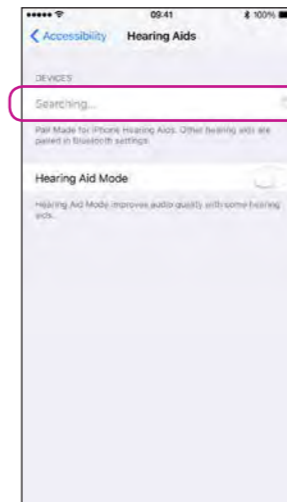

**l'iPhone va maintenant rechercher les aides auditives**  
Ouvrez/fermez le logement de pile des appareils pour que l'iPhone puisse les reconnaître

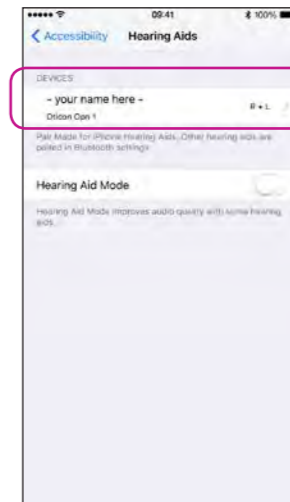


**Sélectionnez les aides auditives dès qu'elles sont disponibles**

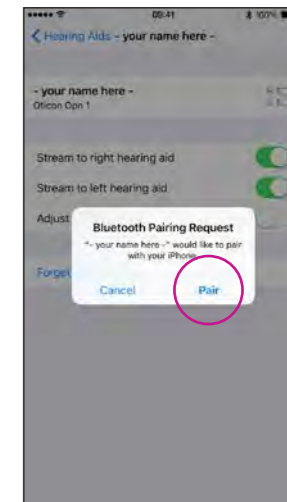

**Confirmez la demande d'appairage Bluetooth : une par aide auditive**




# Aides auditives comme sortie audio par défaut

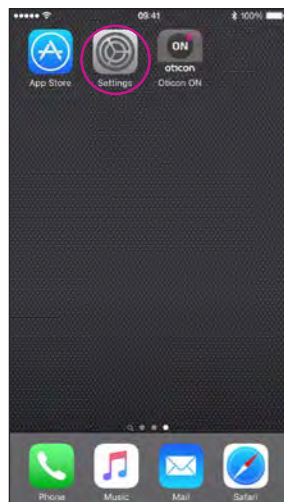


**Sélectionnez Paramètres**



**Sélectionnez Général**

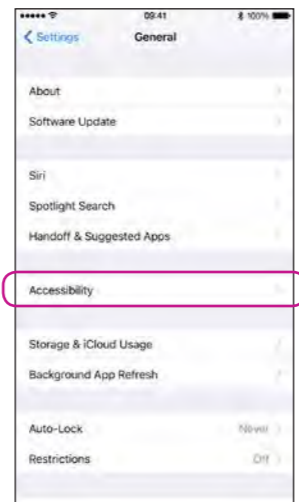


**Sélectionnez Accessibilité**

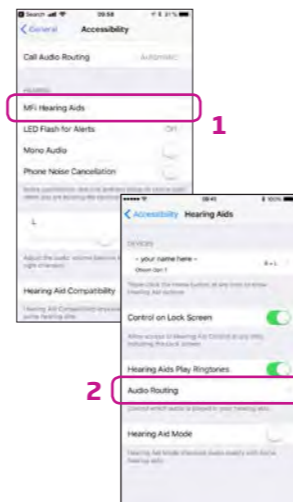

**1. Aides auditives  
2. Acheminement audio**





**1. Appels et audio multimédia  
2. Toujours aides auditives**

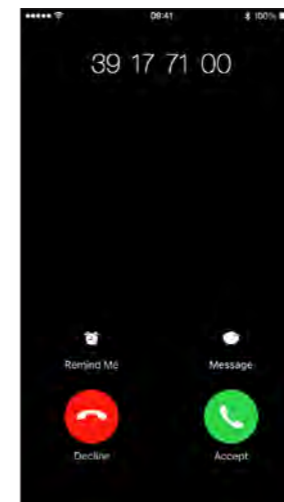


**Vérifier**


Lorsque vous répondez à un appel sur l'iPhone, vous devriez voir vos aides auditives comme sortie audio par défaut (et entendre l'appel dans les aides auditives)

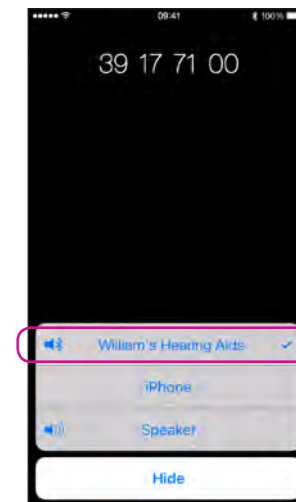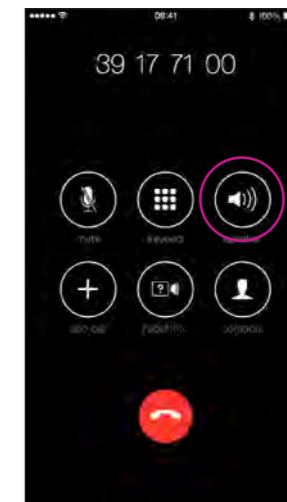


# Installer l'application Oticon ON

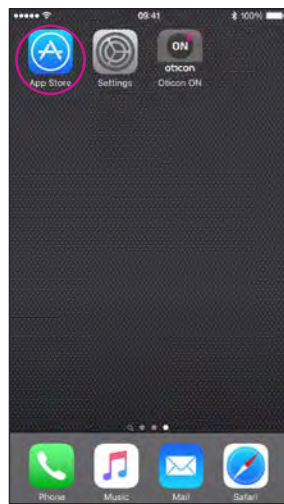


**Trouvez l'icône App Store**

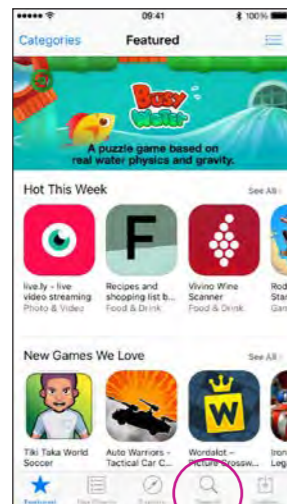


**Sélectionnez Rechercher**

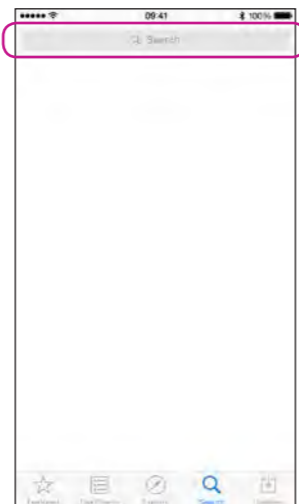


**Tapez « Oticon »**

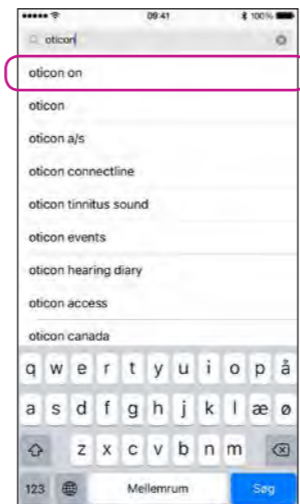

**Sélectionnez Oticon ON**

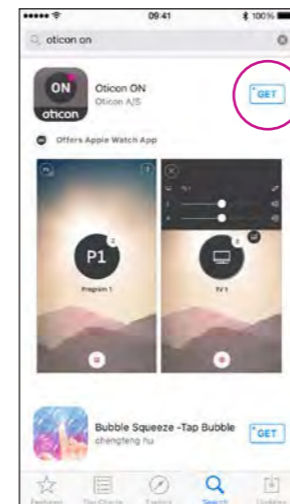


**Sélectionnez l'icône Télécharger**

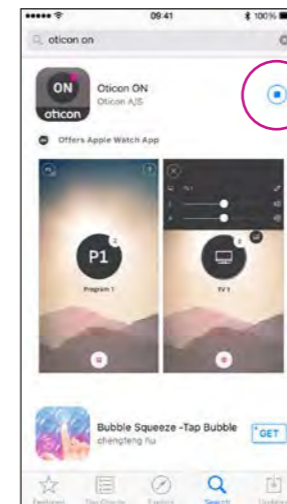

**Installation**




## Première utilisation

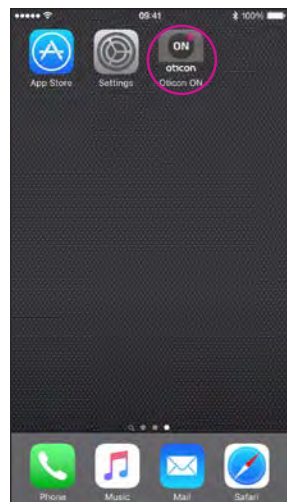

### Démarrez l'application Oticon ON

Une fois installée, l'application Oticon ON peut être démarrée depuis l'écran d'accueil

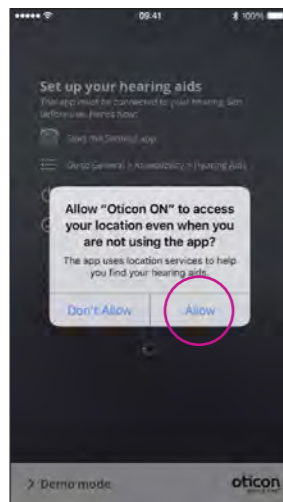

### Première utilisation

Lors du premier démarrage, vous devez autoriser l'accès à l'emplacement ainsi que les notifications, afin d'obtenir la meilleure fonctionnalité possible




### Tutoriel

Lors du premier démarrage de l'application Oticon ON, un bref tutoriel est proposé.


Vous pouvez fermer le tutoriel avec le bouton « X ».

## Fonctions de l'écran d'accueil

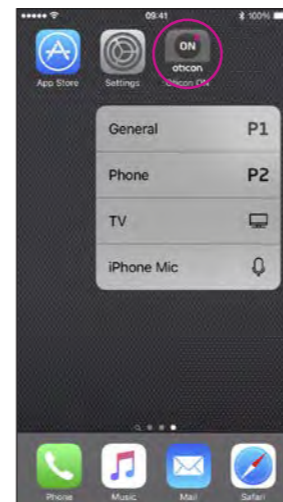

### Tactile 3D\*


Appuyez sur l'application Oticon ON et maintenez-la enfoncée pour accéder instantanément aux programmes

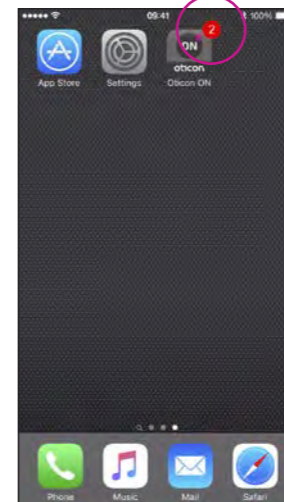


### Perte de connexion

Le point rouge sur l'application Oticon ON vous informe des pertes de connexion

# Sélection du programme/volume et activation du mode silencieux

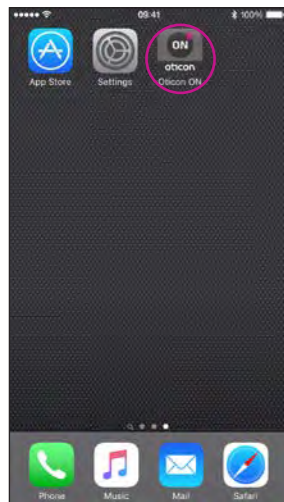

**Démarrez l'application Oticon ON**

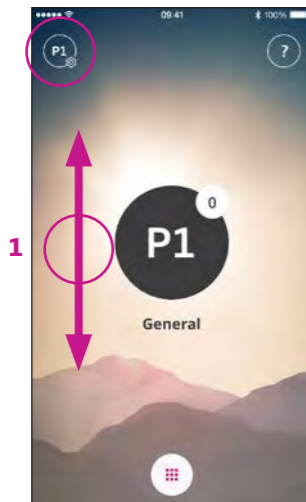


**Volume**  
Une fois démarrée, l'application Oticon ON affiche le programme actuel et le volume actuel.

Pour régler le volume, il suffit de glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas tout en touchant l'écran (1).




**Volume droit et gauche**  
Si activé (voir paramètres), glissez votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran pour ajuster le volume de votre aide auditive gauche ou sur le côté droit pour l'autre côté. Glissez votre doigt au milieu de l'écran ajustera les deux aides auditives en même temps.

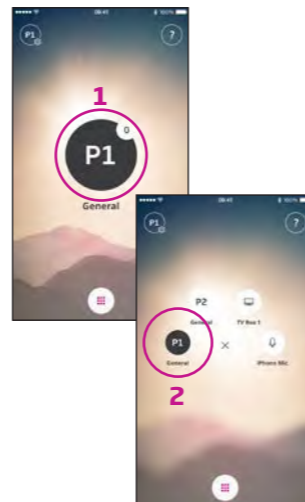

**Sélection du programme**  
Touchez le programme actif pour ouvrir le sélecteur de programmes (1). Sélectionnez le programme que vous souhaitez (2).

Remarque : Le nombre de programmes disponibles est déterminé par votre audioprothésiste

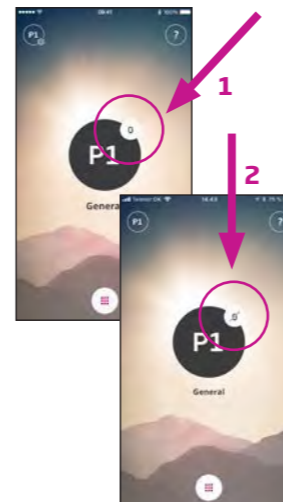


**Activation du mode silencieux des aides auditives**  
Touchez brièvement l'indicateur de volume pour activer le mode silencieux des aides auditives (1).

Vous pouvez désactiver le mode silencieux en réglant le volume ou en touchant l'indicateur du mode silencieux (2).



# Sélectionner/modifier le programme avec sons de soulagement des acouphènes

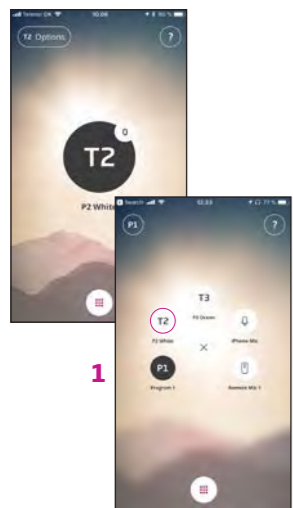

## Selection du programme avec sons apaisants


Si disponible, le programme avec les sons de soulagement pour acouphènes est nommé T1 etc (1).



## Réglage des sons de soulagement des acouphènes

Le volume des sons de soulagement peuvent être ajustés grâce aux fonctions secondaires (2).

Les niveaux droit et gauche peuvent être ajustés indépendamment (3).

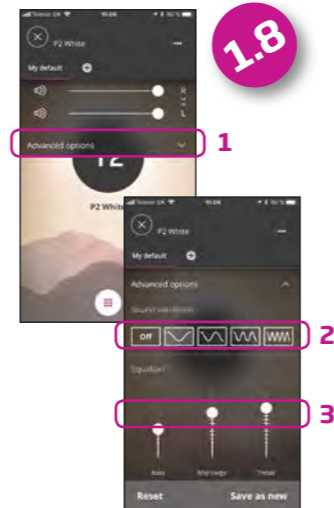


## Modifier les sons de soulagement des acouphènes

Sélectionner Options avancées (1) pour choisir la modulation des sons (2) et ajuster l'égalisateur (3).



Votre réglage préféré peut être enregistré en cliquant sur le signe (+) (1) puis nommer votre favori (2).

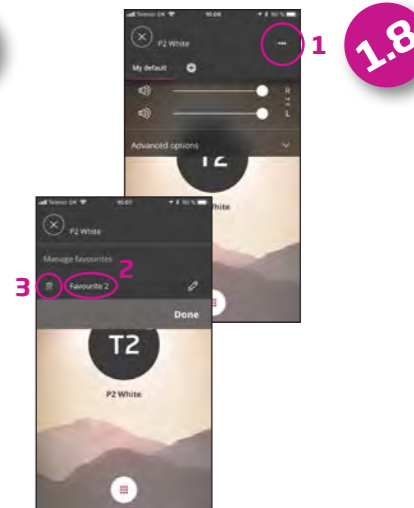

Vous pouvez changer le nom de votre favori (1 et 2) ou le supprimer (3).



## Écouter la télévision (nécessite l'adaptateur TV 3.0)




### Sélectionnez le programme

Touchez le programme actif pour ouvrir le sélecteur de programmes (1)

Sélectionnez le programme TV (2)

Remarque : Le nombre de programmes disponibles est déterminé par votre audioprothésiste

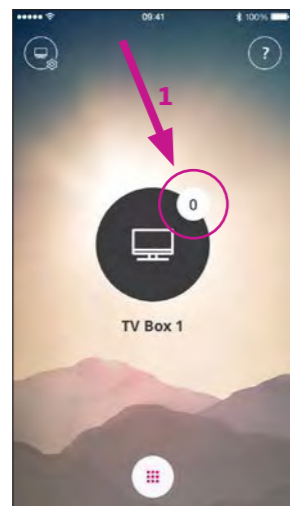

### Activation du mode silencieux des aides auditives

Touchez brièvement l'indicateur de volume pour activer le mode silencieux des aides auditives (1)



Vous pouvez désactiver le mode silencieux en réglant le volume ou en touchant l'indicateur du mode silencieux (2)




### Fonctions secondaires

Touchez l'indicateur des paramètres (A) pour accéder aux fonctions secondaires associées au programme actif.

Vous pouvez alors régler le niveau du signal TV/ audio diffusé (1).


## Ecouter le son du microphone (nécessite ConnectClip)

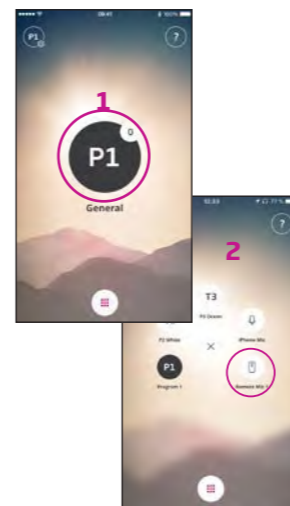

### Sélectionner le Programme


Touchez le programme actif pour ouvrir le sélecteur de programmes (1). Sélectionnez le microphone (2).

Remarque: Le nombre de programmes disponibles est déterminé par votre audioprothésiste

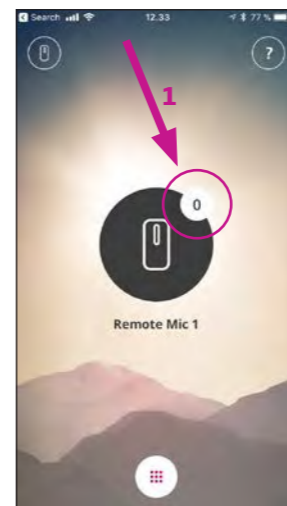


### Mettre les aides auditives en mode silencieux

Touchez brièvement l'indicateur de volume pour désactiver les microphones des aides auditives (1).

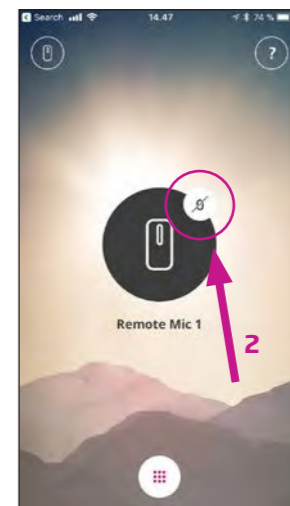


Vous pouvez enlever ce mode silencieux en ajustant le volume ou en touchant l'indicateur de silence (2).

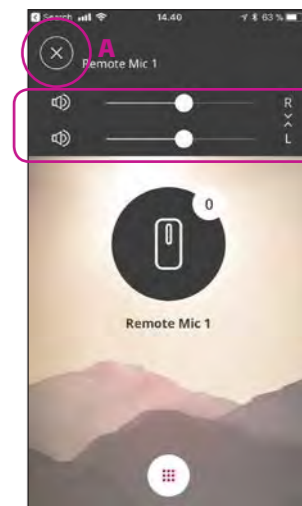

**Fonctions secondaires**  
Touchez les réglages (A) pour accéder aux fonctions secondaires relatives au programme actif.

Vous pouvez alors changer le niveau du signal de streaming (2).


# Les sons de l'iPhone directement dans vos aides auditives

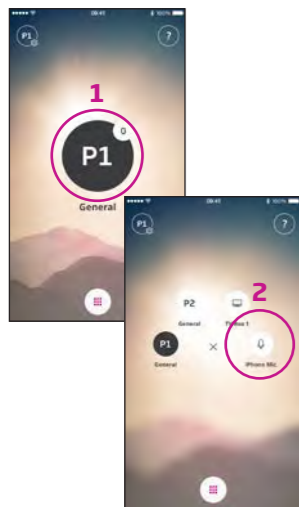

## Sélectionnez le programme

Touchez le programme actif pour ouvrir le sélecteur de programmes (1).  
Sélectionnez le programme Microphone (2).


Remarque : Le nombre de programmes disponibles est déterminé par votre audioprothésiste

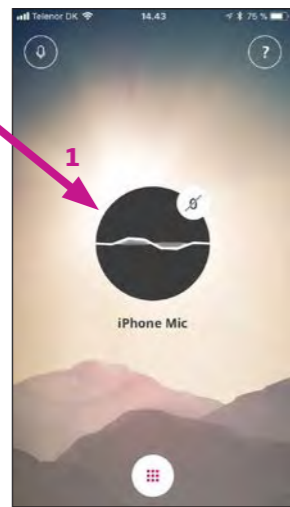

## Position l'iPhone près d'une source sonore

Votre iPhone va maintenant émettre un son à partir du microphone intégré et indiquer le niveau sonore (1).

Remarque : La première fois que vous utiliserez cette fonction, vous devrez autoriser l'accès au microphone

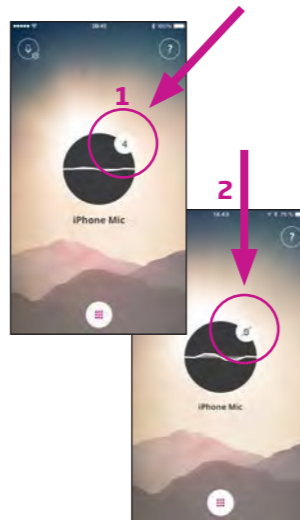

## Activation du mode silencieux des aides auditives

Touchez brièvement l'indicateur de volume pour activer le mode silencieux des aides auditives (1).

Vous pouvez désactiver le mode silencieux en réglant le volume ou en touchant l'indicateur du mode silencieux (2)



# Connexion à Internet/IFTTT

## Introduction


Vous pouvez connecter vos aides auditives Oticon à Internet par le biais de l'application Oticon ON et le service IFTTT (If This Then That).

Avec IFTTT, vous pouvez automatiser vos activités quotidienne - comme allumer les lumières - en allumant vos aides auditives (équipement supplémentaire nécessaire). Ou, vous pouvez aussi paramétrer un texte personnalisé à envoyer à votre smartphone lorsque vos piles sont faibles.


Les possibilités sont infinies !

Rendez-vous sur [www.oticon.fr/ifttt](http://www.oticon.fr/ifttt) pour découvrir tout ce que vous pouvez faire et comment cela fonctionne.


Vous trouverez également de plus amples informations concernant la configuration et la gestion de vos comptes IFTTT.

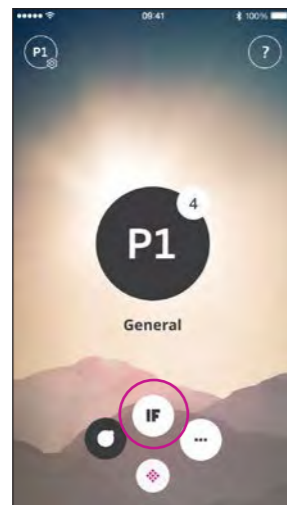

**Connexion à IFTTT**  
Sélectionnez la fonction IFTTT du menu principal

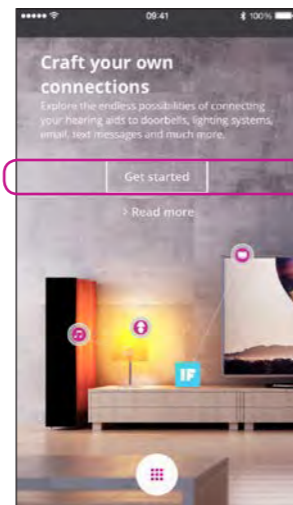


**Première configuration**  
Sélectionnez Démarrer

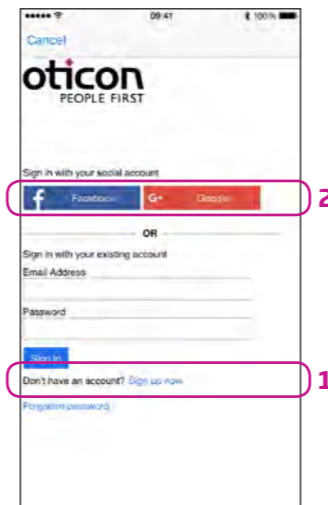


Sélectionnez S'identifier maintenant (1) ou utilisez un compte Facebook® ou Google™ existant (2)

Si vous vous identifiez depuis l'application, vous recevrez un e-mail avec un code que vous devrez saisir pour confirmer votre connexion

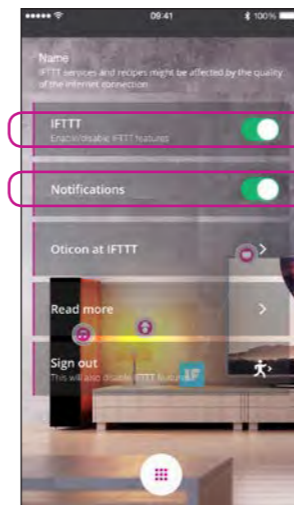

**IFTTT**  
Si l'option IFTTT est désactivée, les événements IFTTT ne sont pas actifs


**Notifications**  
Si cette fonction est désactivée, aucune notification ne s'affichera sur l'écran des notifications de l'iPhone

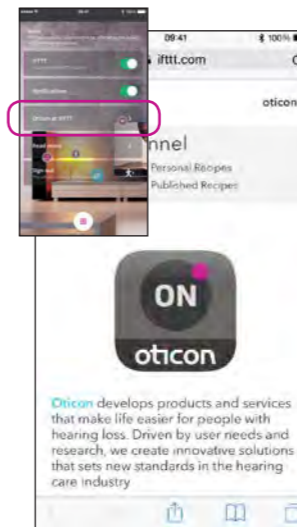

**Oticon sur IFTTT**  
Lien direct vers le canal Oticon sur IFTTT




**En savoir plus**  
Lien direct vers [www.oticon.fr/ifttt](http://www.oticon.fr/ifttt), où vous trouverez de plus amples informations concernant l'application Oticon ON et IFTTT

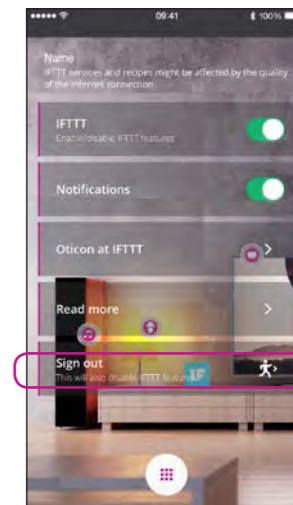


**Déconnexion**  
Ici, vous pouvez vous déconnecter de votre canal IFTTT Oticon ON. Cela arrêtera également tous les événements et déclencheurs IFTTT

# Fonctions secondaires

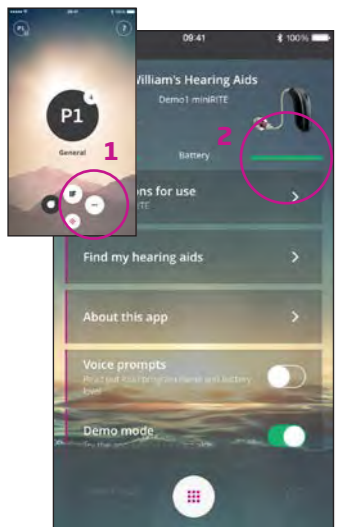


**Paramètres**  
Appuyez sur l'icône des paramètres pour accéder aux fonctions secondaires de l'application Oticon ON (1)


**État de la batterie**  
Présentation visuelle de l'état de la pile pour l'aide auditive gauche et l'aide auditive droite (2)

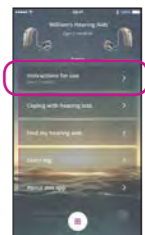

**Mode d'emploi**  
La première fois où l'application se connectera à Internet, elle téléchargera automatiquement les instructions relatives à votre aide auditive spécifique.

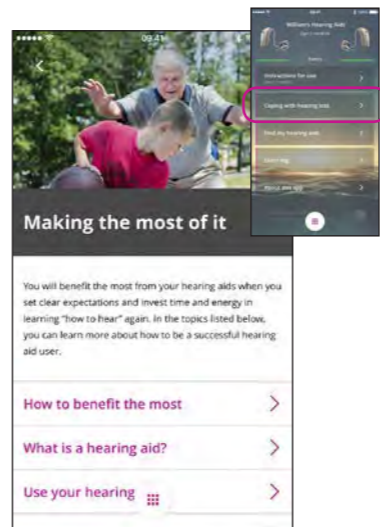


**Faire face à la perte auditive**  
L'application contient des informations et des conseils pour mieux gérer votre perte auditive au quotidien.

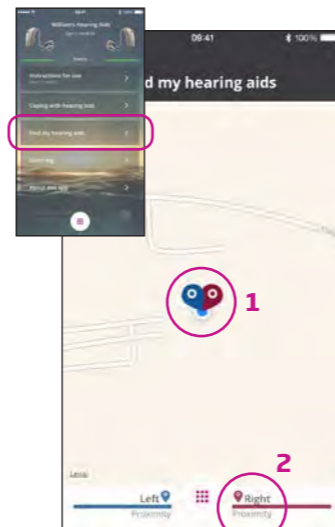


**Retrouver mes aides auditives**  
La carte indique où se trouvaient vos aides auditives lors de leur dernière connexion avec l'iPhone (1). Si ce lieu est proche, les barres de proximité vous indiquent où vous vous trouvez par rapport à vos aides auditives (2).

Remarque : Si vous vous retrouvez hors de portée avec vos aides auditives ou en cas de perte de connexion, les marqueurs rouges/bleus indiquent le dernier emplacement connu des aides auditives.

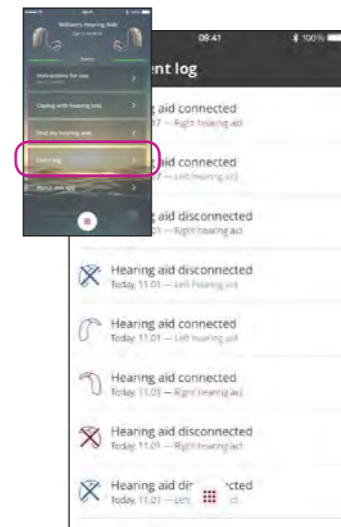


**Journal d'événements**  
L'application inclut la liste des événements récents enregistrés. Par exemple, si une notification a été énoncée, il est possible de la retrouver et de la réécouter dans le journal d'événements.

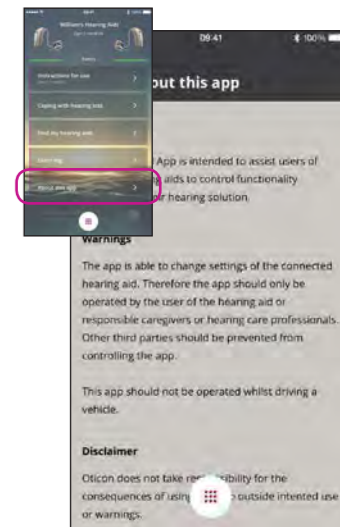


**À propos de l'application**  
Avertissements et avis de non-responsabilité.




# Fonctions secondaires

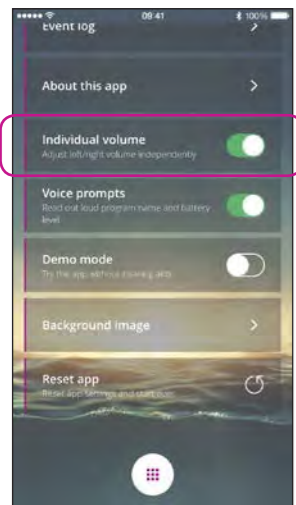


**Volume individuel**  
Cette option permet de gérer le volume de chaque aide auditive de façon indépendante.

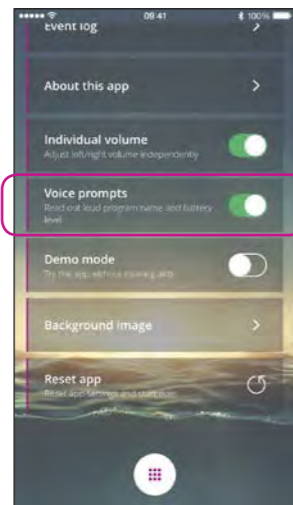


**Messages vocaux**  
Si l'option Messages vocaux est activée, vous entendez le nom du programme et l'état de la pile de vos aides auditives.

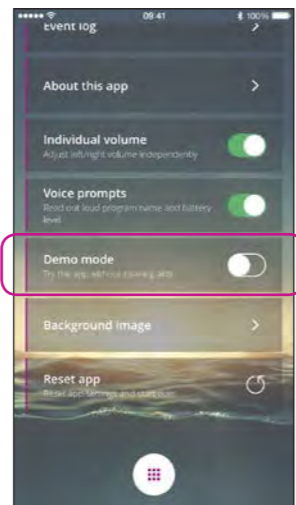

**Mode démo**  
Cette option vous permet d'essayer l'application sans connecter vos aides auditives à l'iPhone.

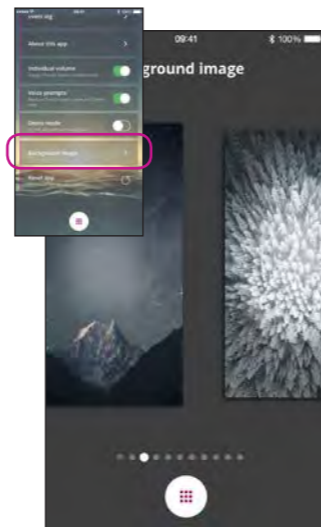


**Arrière-plan**  
L'image d'arrière-plan de l'écran principal peut être personnalisée.

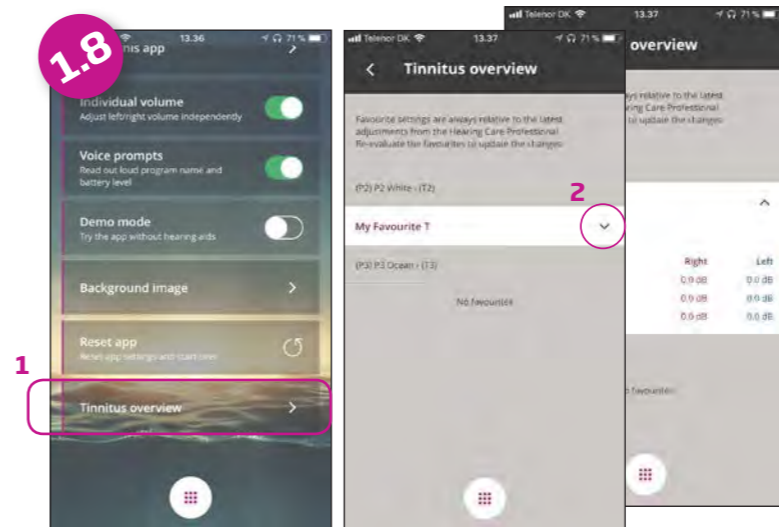

**Acouphènes**  
Sélectionner Acouphènes (1) pour accéder aux réglages défini par l'utilisateur (2).

L'information détaillée (3) peut être utilisée par l'audioprothésiste pour créer un nouveau programme acouphènes permanent.

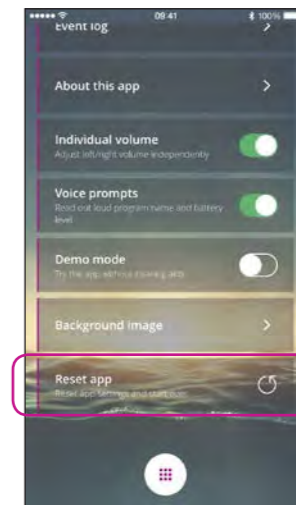

**Réinitialiser l'application**  
Cela permet de revenir aux paramètres d'usine.

Réinitialiser l'application ne supprime pas l'appariement entre l'iPhone et les aides auditives.

# Apple Watch



**Apple Watch**  
L'application inclut une extension pour Apple Watch, ce qui permet aux utilisateurs d'Apple Watch de sélectionner un programme, voir l'état des piles de leurs aides auditives, ajuster le volume ou les mettre en mode silencieux grâce à leur Apple Watch.



**Ajuster le volume**



**Etat des piles des aides auditives**



**Activer le mode silencieux**



**Sélectionner le programme**



[www.oticon.fr](http://www.oticon.fr)

**oticon**  
PEOPLE FIRST