

OTICON | O_pn

Guide rapide

Comment réappairer Oticon O_pn™ avec des accessoires après la mise à jour du firmware



oticon
PEOPLE FIRST

Introduction

Après mise à jour du firmware Oticon Opn, il est nécessaire de réappairer vos aides auditives avec vos accessoires.

Ce guide rapide vous montre comment faire.



Rendez-vous sur le site oticon.fr/connectivity pour de plus amples informations sur la compatibilité, ou consultez la description de l'application Oticon ON sur App Store® et Google Play™.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Sommaire

Télécommande 3.0	3
.....
Préparer la télécommande pour le réappairage	3
.....
Mettre les aides auditives en mode appairage	3
.....
Appairer la télécommande avec les aides auditives	4
.....
Adaptateur TV 3.0	5
.....
iPhone	6
.....
Supprimer « l'ancien appairage » de votre iPhone®	6
.....
Appairer les aides auditives avec votre iPhone	8
.....
Android™	10
.....
Supprimer « l'ancien appairage » de votre appareil Android	10
.....
Appairer les aides auditives avec votre appareil Android	12
.....
Notes	14
.....

Télécommande 3.0

1. Préparer la télécommande pour l'appairage




Appuyez sur tous les boutons et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.

La LED d'état clignote deux fois en vert.

La LED d'état reste allumée en vert pendant environ 10 secondes pour confirmer que la télécommande est prête pour l'appairage.

2. Mettre les aides auditives en mode appairage

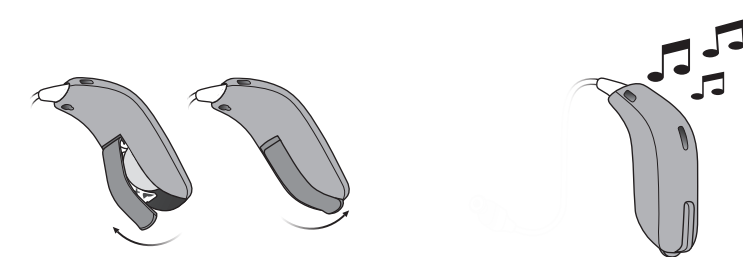


Assurez-vous que les piles adéquates ont été installées dans les aides auditives. Ouvrez les logements de piles des deux aides auditives. Attendez environ cinq secondes, puis refermez les logements de piles.


Attendez environ 10 secondes, jusqu'à ce que les aides auditives soient entièrement mises sous tension et que vous entendiez la petite musique de démarrage.

Les aides auditives restent en mode appairage pendant 3 minutes.


3. Appairer la télécommande avec les aides auditives

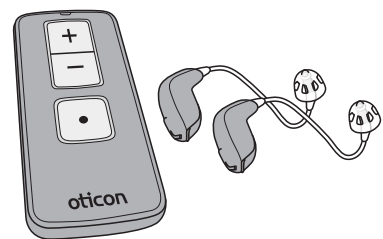

Placez les deux aides auditives à 20 centimètres de la télécommande.

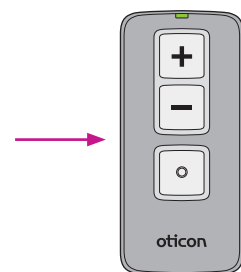


Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton de la télécommande. Elle s'appairera automatiquement avec les aides auditives.

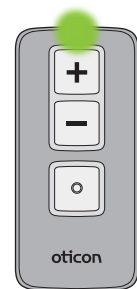

Une fois l'appairage terminé, le voyant d'état reste allumé en vert pendant environ 10 secondes.


1. Appairer l'Adaptateur TV avec les aides auditives (inutile de supprimer les appairages précédents)

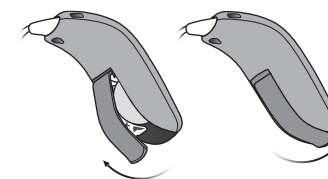

Assurez-vous que les piles adéquates sont insérées dans les aides auditives. Ouvrez les logements de piles des deux aides auditives. Attendez environ cinq secondes, puis refermez les logements de piles.



Attendez environ 10 secondes, jusqu'à ce que les aides auditives soient entièrement mises sous tension et que vous entendiez la petite musique de démarrage.

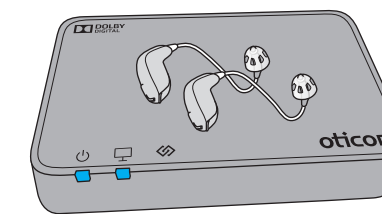


Placez les deux aides auditives près de ou sur l'Adaptateur TV.


L'appairage est terminé une fois que le voyant de mise sous tension et le voyant TV s'allument en bleu pendant environ 30 secondes.

Adaptateur TV	Description
	Appairage terminé


1. Supprimer « l'ancien appairage » de votre iPhone

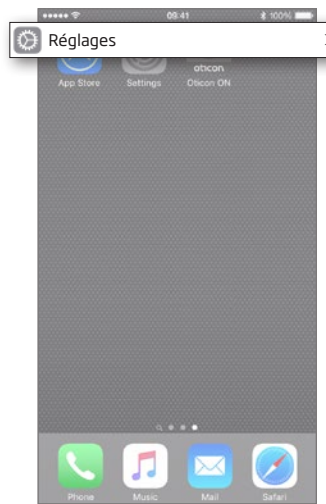


Accédez aux Réglages
Trouvez l'icône Réglages sur votre iPhone.

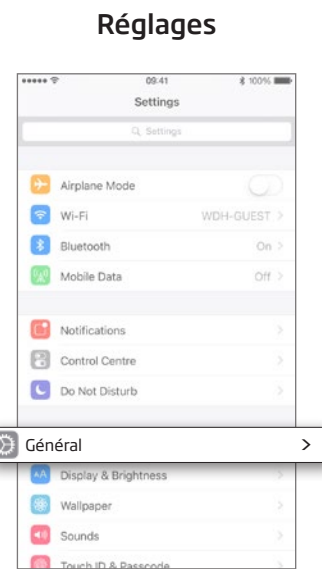


Sélectionnez Général

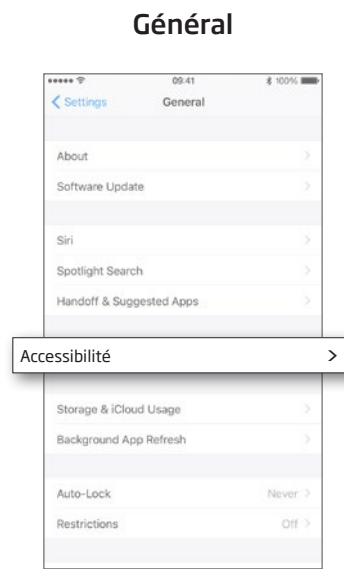


Sélectionnez Accessibilité

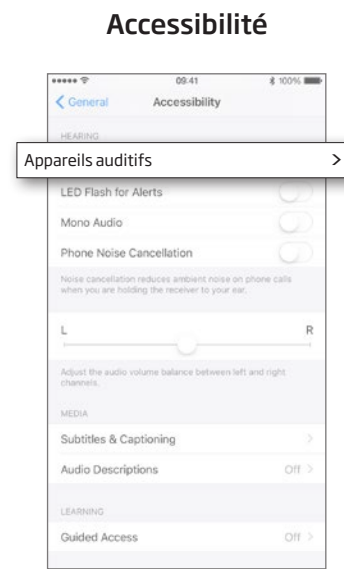

Sélectionnez Appareils auditifs

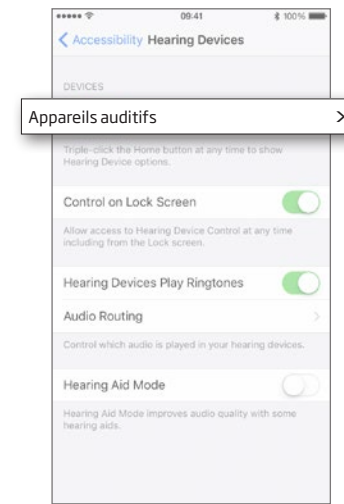

Sélectionnez les aides auditives que vous souhaitez supprimer.

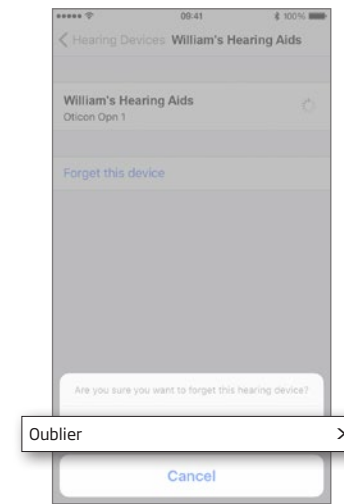

Sélectionnez Oublier




L'iPhone va maintenant rechercher les nouvelles aides auditives.



Désactivez le Bluetooth puis réactivez-le avant de procéder de nouveau à l'appairage.


2. Appairer les aides auditives avec votre iPhone

Réglages

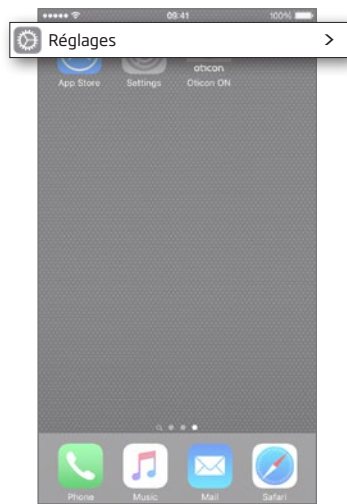


Accédez aux Réglages
Trouvez l'icône Réglages sur votre iPhone.

Général

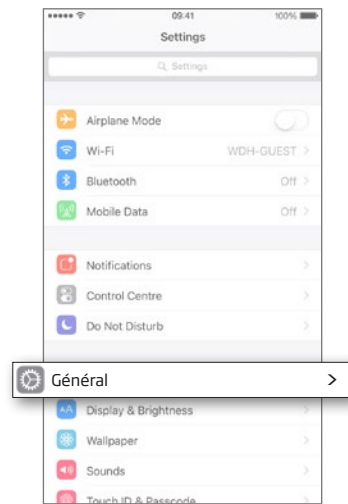


Sélectionnez Général

Général

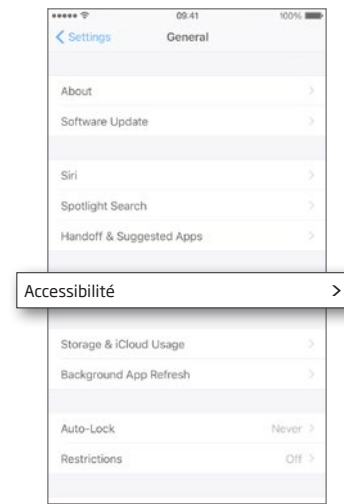


Sélectionnez Accessibilité


Accessibilité

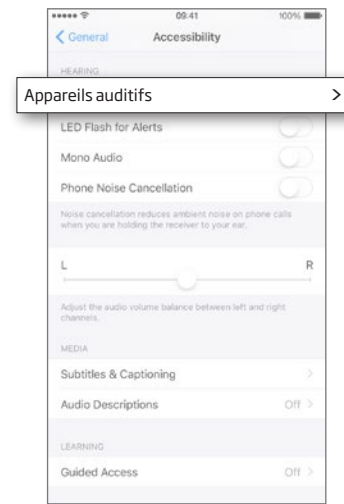

Sélectionnez Appareils auditifs

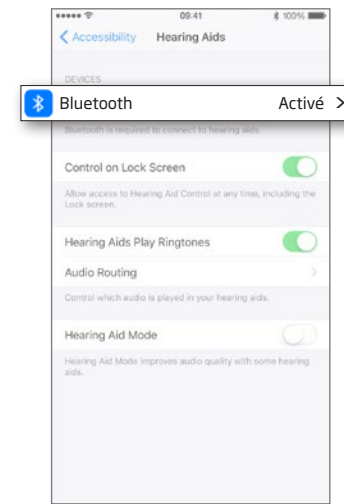

Assurez-vous que le Bluetooth est activé

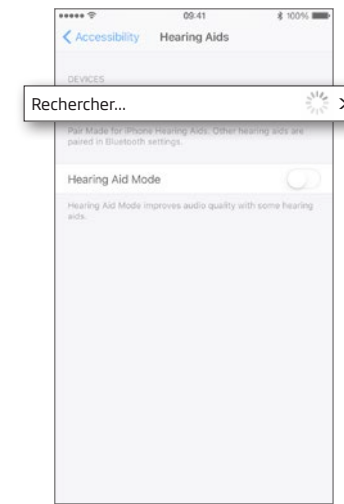


L'iPhone va maintenant rechercher les aides auditives.

Ouvrez puis refermez le logement de pile des appareils pour que l'iPhone puisse les reconnaître.



Sélectionnez les aides auditives lorsqu'elles deviennent disponibles.

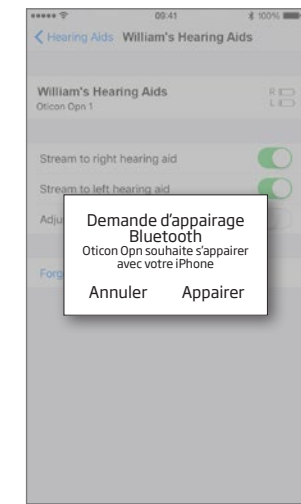


Confirmez la demande d'appairage Bluetooth : une demande par aide auditive.

Appareil Android

⚠ Version 1.0.9 de l'application

1. Supprimer « l'ancien appairage » de votre appareil Android

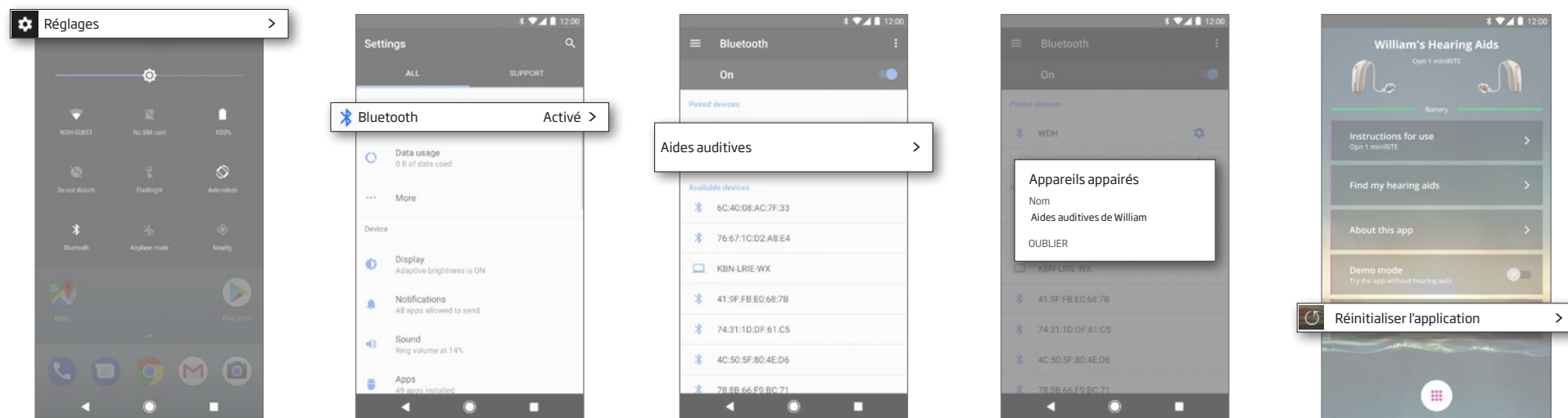

Accédez aux Réglages

Assurez-vous que le Bluetooth est activé


Sélectionnez Aides auditives

Sélectionnez Oublier

Réinitialisez l'application

⚠ Version 1.0.10 de l'application et supérieure

1. Supprimer « l'ancien appairage » de votre appareil Android

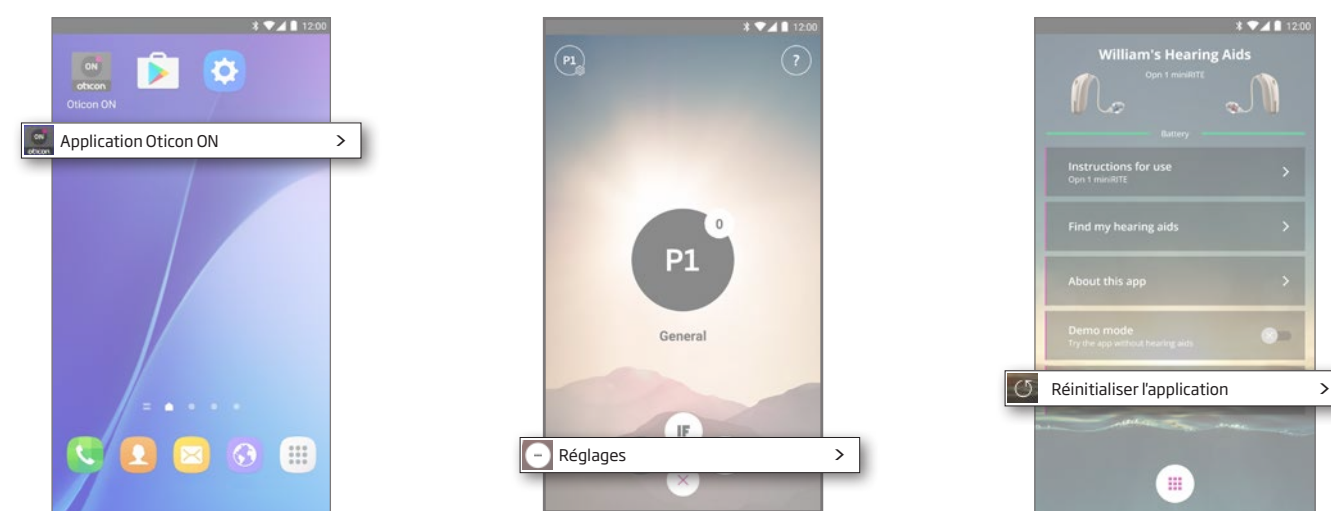


Démarrez l'application Oticon ON


Accédez aux Réglages
Appuyez sur l'icône Réglages pour accéder aux fonctions secondaires de l'application Oticon ON.

Réinitialisez l'application
La réinitialisation de l'application supprimera également l'ancien appairage.


2. Appairer les aides auditives avec votre appareil Android

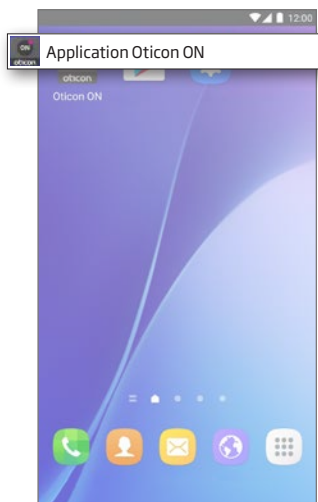


Démarrez l'application Oticon ON

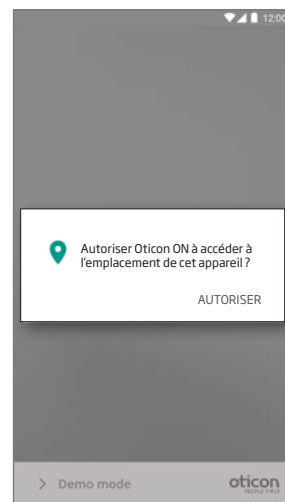


Autorisez l'accès aux informations de l'appareil
Lors du premier démarrage de l'application, autorisez-la à accéder à l'emplacement de l'appareil. Cela garantit la meilleure fonctionnalité possible.

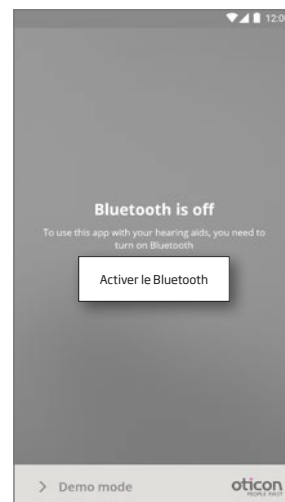


Assurez-vous que le Bluetooth est activé
Si le Bluetooth est désactivé sur votre appareil, il vous montre automatiquement ce message. Appuyez sur « Activer le Bluetooth » et continuez.

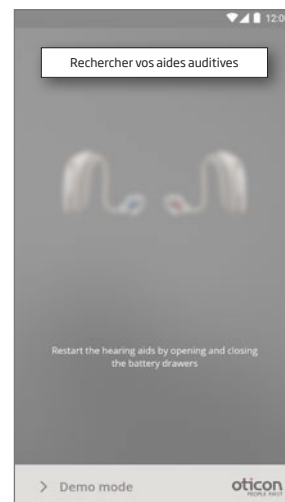


Recherchez vos aides auditives
Votre appareil se connecte à vos aides auditives lorsque vous démarrez l'application Oticon ON. S'il ne parvient pas à trouver vos aides auditives, redémarrez-les en ouvrant leurs logements de piles et en les refermant.

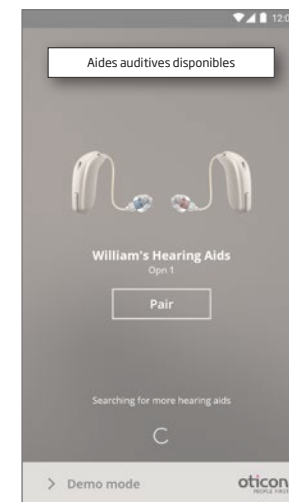

Connectez-le à vos aides auditives
Sélectionnez vos aides auditives en appuyant sur le bouton « Appairer ». Si les aides auditives d'une autre personne apparaissent, essayez à nouveau de rechercher vos aides auditives.

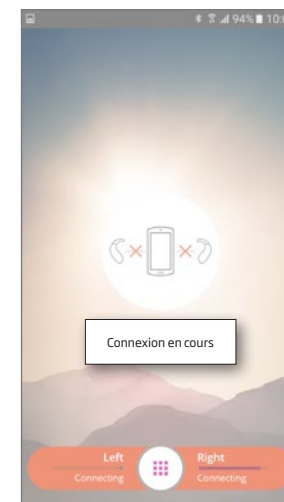

Attendez que l'application Oticon ON se connecte

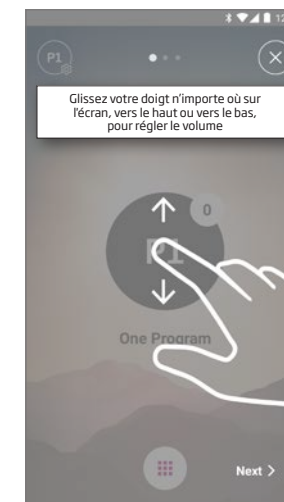

Suivez le tutoriel rapide
Lors du premier démarrage de l'application, elle vous présente un bref aperçu de la façon dont vous pouvez la contrôler.

Remarques



oticon.fr



Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers,
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE

oticon
PEOPLE FIRST